



Información para colocar órdenes

Película Min-R 2000

Paquetes de 100 hojas, sin interfoliar

24 x 30 cm	CAT	148 1977
18 x 24 cm	CAT	181 1884

Pantalla Min-R 2000 en cassette Min-R 2

24 x 30 cm	CAT	899 9492
18 x 24 cm	CAT	810 4101

Pantalla Min-R 2000 en cassette Min-R

24 x 30 cm	CAT	193 0247
18 x 24 cm	CAT	878 4449

Pantalla Min-R 2190 en cassette Min-R 2

24 x 30 cm	CAT	891 0853
18 x 24 cm	CAT	126 0579

Pantalla Min-R 2190 en cassette Min-R

24 x 30 cm	CAT	874 3171
18 x 24 cm	CAT	865 0426

Pantalla Min-R en cassette Min-R 2

24 x 30 cm	CAT	709 1614
18 x 24 cm	CAT	708 7984

Pantalla Min-R en cassette Min-R

24 x 30 cm	CAT	128 4413
18 x 24 cm	CAT	128 4397

Limpiador de pantallas Min-R

1 oz. (473 mL) botella	CAT	845 4977
------------------------	-----	----------

Características Pantalla-película¹

Pantalla KODAK	Película KODAK	Ciclo de Procesado Relativo	Velocidad Relativa ²	Contraste ³	D-Max
MIN-R 2000	MIN-R 2000	Estándar	150	3.60	>4.0
MIN-R 2190	MIN-R 2000	Estándar	190	3.60	>4.0
MIN-R	MIN-R 2000	Estándar	100	3.60	>4.0

1 Proviene de *Screen-Film Processing Characteristics and Quality Control in Mammography* (Publicación Kodak no. N-314). Basados en el revelado vía las procesadoras Kodak RP X-Omat, utilizando químicos preparados Kodak RP X-Omat o equivalentes a temperaturas recomendadas.

2 La velocidad relativa se determina por medio de radiografías con densidad igualada.

3 El contraste es medido como el gradiente promedio entre densidades de 0.25 y 2.00, sobre el velo base.

Parte de un sistema inigualable

Utilice el sistema de película Min-R 2000 con químicos para proceso y equipos de mamografía Kodak, para lograr que sus instalaciones de servicio puedan mantener los estándares más altos de rendimiento y cuidado.

Para información adicional

Para información adicional acerca del sistema de película MIN-R 2000, comuníquese con su representante Kodak o su distribuidor autorizado.

www.kodak.com/go/mammo

EASTMAN KODAK COMPANY
División Imágenes para la Salud
Región Latinoamericana
Miami, Florida 33126

KODAK: LIDER MUNDIAL EN LAS IMAGENES PARA MAMOGRAFIA

KODAK, MIN-R, y X-OMAT son marcas registradas.

M3-287AS Impreso en EEUU. 03/00 (c) Eastman Kodak Company, 2000 CAT No. 134 1601



Sistema de Película KODAK MIN-R 2000

Para la imagen que usted desee alcanzar en el negatoscopio

Kodak



Alcance la imagen que usted desee en el negatoscopio con el Sistema de película **Kodak Min-R 2000**. Este sistema avanzado rinde una mayor resolución, más detalle, y un **contraste más alto** que cualquier otro sistema pantalla-película de mamografía Kodak. Seleccione la combinación de película Min-R 2000 con pantalla 2000, o la más rápida combinación película Min-R 2000 con pantalla 2190 para una reducida exposición al paciente. Cada una de éstas le facilita el mantener **los estándares más altos** de rendimiento y cuidado.



Una mayor confianza en el diagnóstico

- Contraste optimizado e imágenes considerablemente más nítidas y detalladas
- Menos defectos de "mayor densidad en la imagen"
- Detección mejorada con defectos mínimos, aún en el tejido denso de mama



"El sistema de película Kodak Min-R 2000 me proporciona confianza en el diagnóstico porque me brinda de manera consistente un mayor contraste y una resolución más detallada."

A. Christine Watt, M.D.,
Jefe de la Sección de Imágenes de Mama,
St. John Hospital y Medical Center, Detroit, MI,
y Grosse Pointe Physicians X-Ray Center, P.C.,
Grosse Pointe Woods, MI

Mayor consistencia

- Menor variabilidad diaria en el Control de Calidad (Q.C.)
- Mayor tolerancia a fluctuaciones mínimas en las temperaturas de proceso
- Mayor mantenimiento de la calidad (sensibilidad y densidad no disminuyen con la vida de la película)

Mayor productividad

- Se reduce la necesidad de repetir y volver a citar a pacientes por problemas de calidad de imagen
- Ciclo de proceso estándar
- Menos defectos de imagen y problemas de proceso cuando se utiliza con químicos y equipos Kodak

Selección de pantallas

Puede seleccionar la pantalla Min-R 2000 con la película Min-R 2000 para una excelente resolución y calidad de imagen. Para un sistema de mayor velocidad, puede utilizar la pantalla Min-R 2190 con la película Min-R 2000. Con una velocidad relativa de 190 (comparado con 150 para la pantalla Min-R 2000), la combinación de película Min-R 2000 con pantalla 2190 reduce la dosis de radiación, así como la imagen

borrosa asociada con el movimiento del paciente. Aún con su velocidad aumentada, existe una pérdida mínima de nitidez. Esta combinación produce un detalle refinado, especialmente en el tejido denso de mama, y es excelente para los estudios magnificados.

Selección de cassettes

Todas las pantallas Min-R están disponibles en el cassette Min-R o Min-R 2. El cassette Min-R 2 permite que la película sea colocada hasta el extremo del tórax, optimizando la toma de imágenes de la pared torácica.

Además, su diseño le permite:

- Reducir el tiempo de espera para un buen contacto pantalla/película.
- Acomodar una pantalla más grande para una mejor cobertura de película.
- Trabajar con equipos Kodak para carga y descarga a luz ambiente (requerido por el Kodak Miniloader 2000 y 2000P)

El cassette Min-R le proporciona una carga rápida y fácil para procedimientos de mamografía. Con una compresión apropiada, permite una buena

visualización de la información del tejido blando cercano a la pared torácica.

Limpiador de pantalla que brinda resultados óptimos

Puede optimizar la calidad de sus imágenes mamográficas con el limpiador de pantallas Kodak Min-R. Especialmente formulado para ser utilizado con el sistema de película Min-R 2000, este limpiador ayuda a eliminar el polvo y suciedad que pueden causar los defectos de "menor densidad".

Selección de Pantalla que se ajusta a sus necesidades

Pantalla KODAK	Dosis	Ruido	Detalle
MIN-R	Medio	Bajo	Alto
MIN-R 2000	Bajo	Bajo	Alto
MIN-R 2190	Más bajo	Medio	Medio



"La película Kodak Min-R 2000 y la pantalla 2190 establecieron un estándar. Para pacientes con tejido de mama denso, el sistema proporciona una calidad de imagen superior. Y una pantalla más rápida significa que la mujer recibe un 40 por ciento menos de radiación, que en el pasado."

László Tabár, M.D., Director, Departamento de Mamografía,
Falun Central Hospital, Falun, Suecia