

Una procesadora a su alcance con la calidad reconocida de KODAK

La Procesadora KODAK Medical X-Ray ofrece un proceso automatizado confiable a un precio muy económico. Esta unidad de mesa se puede adaptar a cualquier lugar en su clínica, consulta privada, u otro servicio de salud. Un diseño simple y racionalizado, proporciona gran confiabilidad, agilidad de uso, y fácil servicio de mantenimiento. Esta procesadora forma parte de la línea de productos Kodak Medical X-Ray—películas, pantallas, cassettes, químicos y procesadoras—brindando excelente rendimiento a precios muy atractivos. Kodak continúa con su compromiso para ayudar a todos sus clientes a alcanzar sus necesidades de calidad de imagen, productividad, y servicio.

Calidad sorprendente

Diseñado para aplicaciones de radiografía general, esta unidad de mesa otorga una calidad de imagen sorprendente siendo una procesadora con un tanque de poca profundidad—en particular, cuando se utiliza con películas y químicos de proceso Kodak Medical X-Ray.

Resultados constantes

Reduzca imperfecciones y obtenga resultados constantes con la ayuda de los ciclos de anti-cristalización y anti-oxidación, que mantienen las rejillas limpias y la actividad química apropiada, cuando la procesadora no está en uso.

Película hasta de 35 cm de ancho

Procese hojas de película hasta de 35 x 43 cm (14 x 17 pulgadas)—ó tan pequeñas como de 10 x 10 cm (4 x 4 pulgadas). Procese rollo de película hasta de 35 cm (14 pulgadas) de ancho.

Imágenes en menos de 2 minutos

Visualice imágenes en tan solo 1 minuto, 45 segundos. De esta forma encontrará que estos tiempos son muy ventajosos en relación a los 5 minutos del proceso standard manual.



Ahorros en químicos, agua, y energía

Reduzca el uso de químicos y costos con el reforzador automático "inteligente", que utiliza un micro-sensor para reforzar los químicos, de acuerdo a la superficie de película realmente procesada. Ahorre costos de agua y energía con una modalidad de reserva integrada dentro del sistema, que reduce el consumo cuando la procesadora no está en uso.

Fácil de usar y mantener

Un tablero de control conveniente permite llenar los tanques fácilmente durante el ciclo de calentamiento. Con el control de microprocesador, ajustar las temperaturas es sencillo y exacto. La procesadora señala automáticamente cuando está listo para procesar la siguiente película. Pocas partes móviles, así como rejillas de transporte de película que son fáciles de mantener, simplifican el mantenimiento y servicio.



PROCESADORA KODAK MEDICAL X-RAY

Selección de accesorios opcionales

Optimize la conveniencia y el valor de su procesadora Kodak Medical X-Ray con una selección de accesorios:

- Adaptador para rollo de película para la Procesadora Medical X-Ray / 220 V, 50 Hz
- Base de Soporte para la Procesadora Medical X-Ray
- Unidad de Almacenaje para la Procesadora Medical X-Ray
- Equipo de Escape para la Procesadora Medical X-Ray / 220 V, 50 Hz
- Tanques de refuerzo, 25L
- Tanques de refuerzo, 12L (incluidos con la procesadora)

Servicio y soporte


Los distribuidores autorizados de productos Kodak que venden la procesadora Kodak Medical X-Ray, proporcionan servicio y soporte en colaboración con Kodak. Para información adicional, favor de comunicarse con su distribuidor local, o su compañía Kodak local.

Instalación eficaz

Una instalación fácil significa que usted estará procesando películas en poco tiempo. El personal de su Institución puede instalar la procesadora en aproximadamente cuatro horas. Un distribuidor bien entrenado requiere de aproximadamente dos horas.

Infórmese más

Para información adicional acerca del sistema de película Kodak Medical X-Ray, comuníquese con su distribuidor autorizado para productos Kodak de imágenes para la salud, o contacte a su compañía Kodak local.

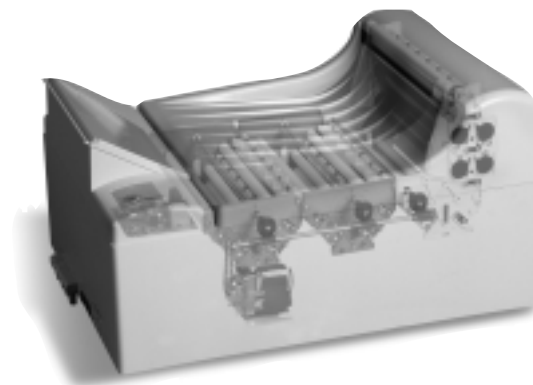

ESPECIFICACIONES

Ciclo de Proceso

105 segundos—ciclo estándar
Ciclo 90 segundos*/ capacidad para ciclo de 135 segundos

Rendimiento

62 películas/hora (35 x 43 cm/14 x17 pulgadas) en ciclo 105 segundos
72 películas/hora (35 x 43 cm/14 x17 pulgadas) en ciclo 90 segundos
48 películas/hora (35 x 43 cm/14 x17 pulgadas) en ciclo 135 segundos

Dimensiones

Largo: 77 cm/30 pulgadas
Ancho: 59 cm/23 pulgadas
Alto: 42 cm/16.5 pulgadas

Peso

Sin químicos: 35 kg/77 lbs
Con químicos: 50 kg/110 lbs

Electricidad

Modelo 101: 110/120 V, 50/60 Hz, 15 amps
Modelo 102: 220/240 V, 50 Hz, 8.8 amps
Consumo:
Modelo 101: 1.6 kW/h durante proceso
(0.12 kW/h en modalidad de reserva)
Modelo 102: 2.1 kW/h durante proceso
(0.12 kW/h en modalidad de reserva)

Agua

Ambiente: 5–30°C (41–86°F)
Índice de flujo: 1.9 L/min (0.5 gal./min) durante proceso (0.0 en modalidad de reserva)

Eastman Kodak Company
División Imágenes para la Salud
Región Latinoamericana
Miami, Florida 33126
USA

www.kodak.com/go/health

*Tiempo de proceso de 90-segundos compatible en ciertas películas con sensibilidad al verde.

DIVISIÓN IMÁGENES PARA LA SALUD
UNA MEJOR VISIÓN DE VIDA.

